



# Mini-guide

Sykehus, tannleger, omsorgssenter, klinikker, fysioterapeuter og en-til-en behandling



## LIFE CLEAN

- Overflatedesinfeksjon
- Ferdig blandet, Klar til bruk
- 2 minutt virketid

Kan brukes til desinfisering av f.eks.:

- Senger
- Nattbord
- Alarmknapper
- Telefoner
- Fjernkontroller
- Infusjonspumper/stativ
- Toalett/toalettstoler
- Strømbrytere
- Dørhåndtak
- Utstyr rundt sengen
- Tastatur
- Stoler
- Skjermvegger
- Instrumenter (eks. infusjonspumpe)

DØVIGEN AS | Telefon 23 05 10 50 | ordrekontor@dovigen.no | www.dovigen.no

Norovirus | Clostridium difficile | MRSA | ESBL | Coronavirus



Se videoen



LIFECLEAN

HEALTHCARE

For komplett liste se Microbiological Efficacy Summary

# LIFE CLEAN

## HEALTHCARE

### Hvordan bruke LifeClean



1. Åpne flasken og merk denne med åpningsdato.



2. Påfør riktig mengde LifeClean på ren overflate. La LifeClean virke i 2 minutt. Trenger ikke vaskes bort etterpå (vi anbefaler å skylle bort på stål/metall).



**Obs!** Urene flater skal alltid rengjøres før påføring av LifeClean desinfeksjon.



**Tips!** Legg utstyret i en beholder med LifeClean. Om utstyret ikke kan bløtlegges, påføres LifeClean direkte på utstyret.

For mer informasjon om personlig håndtering, se sikkerhetsdatablad.

Åpnet flaske er holdbar i 4 uker  
– Uåpnet i 9 måneder.

**NB! Skyll av stål/metall etter virketid for å unngå skjolder. Ved desinfisering av elektronisk utstyr og elektriske maskiner, skal LifeClean påføres med klut.**

### Appliseringsteknikker



LifeClean flaske og microfiberklut



LifeClean flaske med spraymunnstykke



Elektrostatisk spray (Håndholt/ryggsekk)

DØVIGEN AS | Telefon 23 05 10 50 | ordrekontor@dovigen.no | www.dovigen.no



© 2020-04-23, LifeClean International AB.  
ikoner av Freepik fra [www.flaticon.com](http://www.flaticon.com)

Godkjent av Statens legemiddelverk og anbefalt og vurdert av SSI